


# 移動用リフト

移動はいきいき生活の基本。  
 一日に何度もすることだから、  
 より安全に快適に。  
 介護の負担を少なくしましょう。

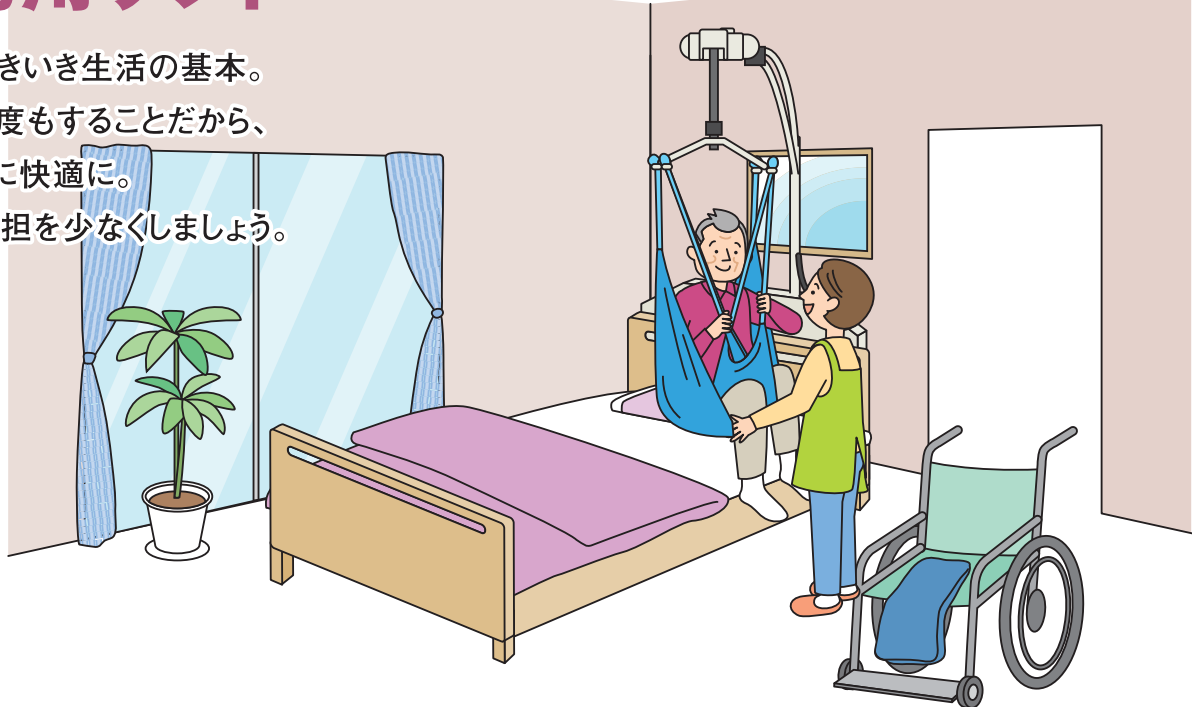

## 移動用リフトの種類

移動用リフトは3種類。使う目的や場所によってお選びください。

### 段差解消機



電動昇降機

### 立ち上がり用



昇降座いす

### 床走行式




電動介護リフト

## 車椅子用昇降機設置のためのチェック項目

昇降機を設置される前に、以下のことをご確認ください。

総重量	ご利用者と車椅子(機種によっては介護者も含め)の総重量が、ご希望の機種の耐荷重以内であること。
コンセント	設置場所から4m以内のところにAC-100Vのコンセントがあること。ない場合は延長コード等をご用意ください。
設置面	昇降機は水平な場所に設置してください。 なお土の上には設置しないでください。
建物の寸法	右図の寸法を ご確認ください。 ① 地面から出入口までの高さ ② 出入口の間口寸法 ③ 壁から出入口までの寸法

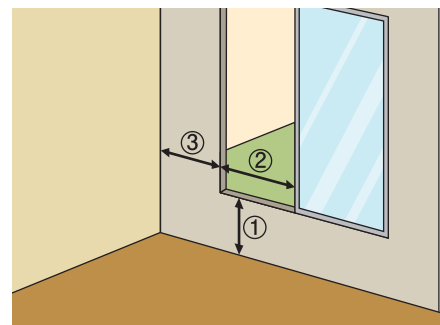

## 車椅子用昇降機の設置について

- 1 雨天時にも安心して外出できるように、また昇降機を雨から守るためにも屋根を付けることをおすすめします。
- 2 昇降機から道路までの通路の段差解消や路面の整備などについては、介護保険の住宅改修制度が利用できます。
- 3 昇降機は土の上に置かずコンクリートなどで平坦に仕上げていただくことをおすすめします。この部分の工事は介護保険でいう「住宅改修を伴うもの」とは見なされませんので工事をして昇降機をレンタルで取扱うことができます。

※設置工事に要する費用については、各市区町村の補助制度などが利用できる場合がありますので最寄りの窓口でご確認ください。

